

Reinigung u. Desinfektion von Beatmungsmasken

Ziel:

- Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten

Durchführung

Manuelle Instrumentendesinfektion

- Desinfektionslösung ansetzen mit Perfektan Neu (1 Stunden Wert)
- Beatmungsmasken sofort nach Gebrauch in geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung legen.
- Sämtliche zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen mit der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein.
- Je nach Verschmutzungsgrad Desinfektionslösung erneuern.
- Nach der Einwirkzeit Instrumente (Beatmungsmasken) gründlich mit klarem Wasser abspülen.
- Eine letzte Sichtprüfung durchführen und die Masken Cache zuordnen und sachgerecht verpacken.

Häufigkeit

- Nach jedem Gebrauch oder nach Sichtbarer Verschmutzung.
(komplette Cache)

Mit geltenden Unterlagen

- Sicherheitsdatenblatt Betriebsanleitung